

인체 형상에 맞게 사전 성형 제작된 Splint에
벨크로화스너가 부착되어 탄력붕대가 필요없는



Smart Splint



Juthis

(주)쥬디스코퍼레이션

(주)쥬디스코퍼레이션은
정형외과용 부목 개발과 제품공급으로
국민보건 향상에 최선을 다하고 있습니다.

국내 신기술이 적용된 습기경화용 폴리우레탄을 사용하여 개발한 합성캐스터와 합성스프린트를 바탕으로 인체형상에 따라 성형 제작한 Splint에 Velcro Fastner를 부착하여 시술자의 편의성과 환자의 편안함을 제공하는 Smart Splint를 개발, 공급하고 있습니다.


앞으로 사용자 중심의 편의성과 편안함을 제공하는 제품공급에 아낌없는 투자와 노력을 기울여 나갈 것이며, 끊임없는 도전정신으로 고객을 먼저 생각하고 고객과 함께 발전할 수 있도록 최선을 다해나갈 것을 약속드립니다.

감사합니다.

대표이사 **유 철 욱**

특징


- 순수 국내기술로 만든 세계 최초의 신개발제품.
(국내특허 제0385790호 미국특허 US6,595,937 등록. 일본, 유럽, 중국 특허출원 중)
- 인체의 형상에 따라 사전 성형 제작되어 시술 시 꺾고, 비틀고, 당길 필요가 없어 사용하기 편리하다.
- 시술시간이 절약되어 환자의 처치에 대한 불안감과 시술자의 피로도를 감소시킬 수 있다.
- 가볍고 강도가 우수하며, X-ray 투시가 우수하다.
- Smart Splint는 벨크로화스너(찍찍이)를 부착하여 탄력붕대를 감을 필요가 없다.

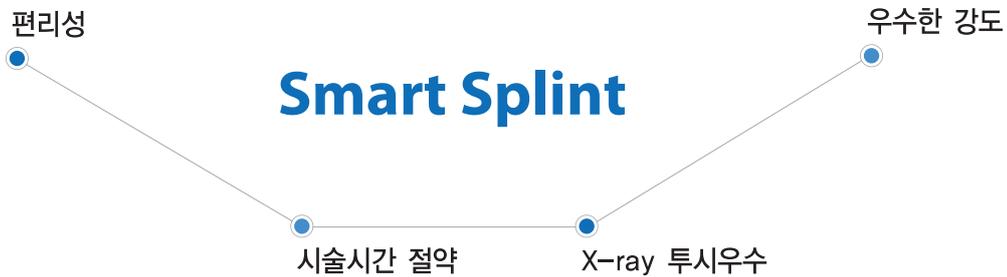

사용시 주의사항

- 상온 (24℃정도)의 건조하고 서늘한 곳에 보관한다.
- 사용하는 분의 습관에 따라 굳기가 빠르고 느릴 수 있다.
- 물에 적시는 시간과 물의 온도로 경화시간을 조절할 수 있다.
- 환부 및 상처의 정도에 따라 적합한 제품을 선택한다.
- 제품의 바깥부분을 물에 적심으로써 가능한 환부에 물이 닿지 않게 하고, 수분의 배출을 빠르게 할 수 있다.
- 충전물의 쓸림을 방지하기 위해 제품은 눕혀서 보관한다.

제품명 읽는 방법

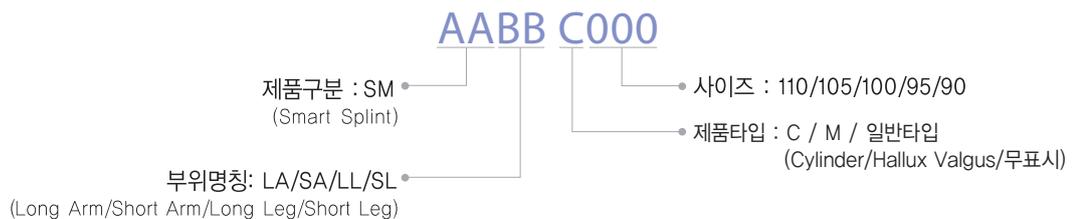

Smart Splint 사용방법



1. Smart Splint를 개봉합니다.




2. 양 끝 쪽을 벌려 물을 뿌립니다.



3. 예비 벨크로를 채웁니다.
(체형에 맞게 성형 가능)



4. 벨크로를 채워 고정시킵니다.

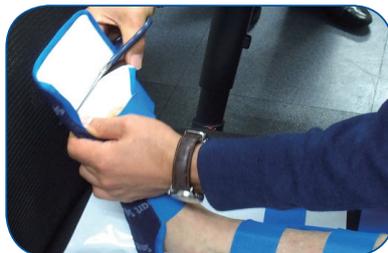

5. 체형에 맞게 잘라냅니다.



6. 동봉된 마감 테이프로 마무리합니다.



7. 예비 벨크로를 잘라냅니다.



8. 동봉된 대체 벨크로를 채웁니다.



9. 완성된 Splint 입니다.

동봉된 대체 벨크로 사용방법

• 동봉된 대체 벨크로는 일체형으로 부착된 벨크로를 잘라낸 후 사용하실 수 있습니다.

- ① 일체형 벨크로를 가위로 잘라냅니다.
- ② 별도 동봉된 대체 벨크로를 잘라낸 부위에 한쪽 끝을 고정시키고 환부에 한바퀴 감아 고정시킵니다.
- ③ 대체 벨크로는 자주 떴었다 붙었다 하여도 접착력이 강하여 환부를 단단히 고정시킬 수 있습니다.

보험코드

Smart Splint (Short Arm): K8108002

Smart Splint (Long Arm): K8108005


Smart Splint SHORT ARM / LONG ARM



<SHORT ARM SMSA 1>




<SHORT ARM SMSA 2>

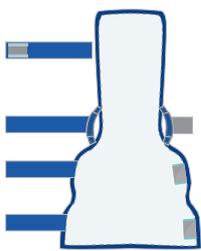

Volar Splint Dorsal Splint Ulnar Gutter Splint



<SHORT ARM SMSA 3>

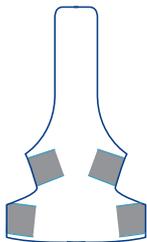

<SHORT ARM SMSA 4>



<LONG ARM SMLA>


부위별	형명	부위별	형명	부위별	형명
SHORT ARM	SMSA 1105(대형)	SHORT ARM	SMSA 2105(R/L)(대형)	SHORT ARM	SMSA 3105(대형)
	SMSA 1100(중형)		SMSA 2100(R/L)(중형)		SMSA 3100(중형)
	SMSA 195(소형)		SMSA 295(R/L)(소형)		SMSA 395(소형)
	SMSA 190(특소)		SMSA 290(R/L)(특소)		SMSA 390(특소)
SHORT ARM	SMSA 4105(대형)	LONG ARM	SMLA 105(대형)	비고 • 대형: 체중 90kg 이상 사용 • 중형: 일반 성인 사용 • 소형: 마른 체형(체중 50kg 미만) 및 청소년 사용 • 특소: 어린이 사용	
	SMSA 4100(중형)		SMLA 100(중형)		
	SMSA 4095(소형)		SMLA 95(소형)		
			SMLA 90(특소)		

보험코드


Smart Splint (Long Leg): K8108011

Smart Splint (Short Leg): K8108008


Smart Splint LONG LEG / SHORT LEG

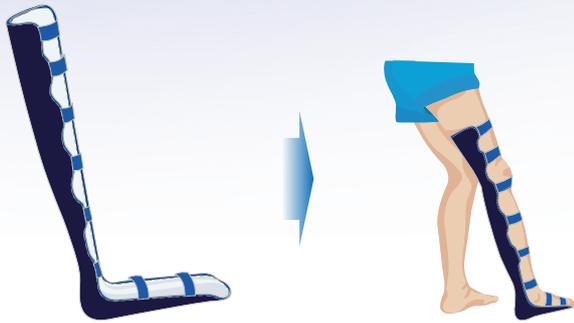

<LONG LEG SMLL>

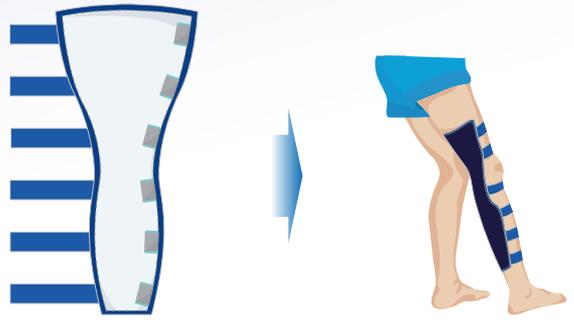

<LONG LEG SMLL C (CYLINDER)>

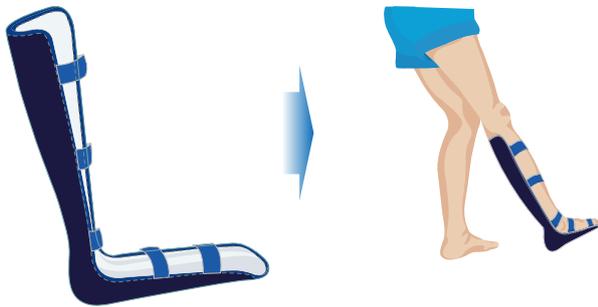

<SHORT LEG SMLS>



<SHORT LEG SMLS M (무지외반증, Hallux Valgus)>

부위별	형명	부위별	형명	비고
LONG LEG	SMLL 105(대형)	LONG LEG CYLINDER	SMLL C105(대형)	<ul style="list-style-type: none"> • 대형: 체중 90kg 이상 사용 • 중형: 일반 성인 사용 • 소형: 마른 체형(체중 50kg 미만) 및 청소년 사용 • 특소: 어린이 사용
	SMLL 100(중형)		SMLL C100(중형)	
	SMLL 95(소형)		SMLL C95(소형)	
	SMLL 90(특소)		SMLL C90(특소)	
SHORT LEG	SMSL 105(대형)	SHORT LEG 무지외반증 (Hallux Valgus)	SMSL M105(대형)	
	SMSL 100(중형)		SMSL M100(중형)	
	SMSL 98(플러스)		SMSL M95(소형)	
	SMSL 95(소형)		SMSL M90(특소)	
	SMSL 90(특소)			

보험코드


Smart Splint (Short Arm): K8108002

Smart Splint (Long Arm): K8108005

Smart Splint (Short Leg): K8108008

Smart Splint (Long Leg): K8108011

Smart Splint Wide (와이드)

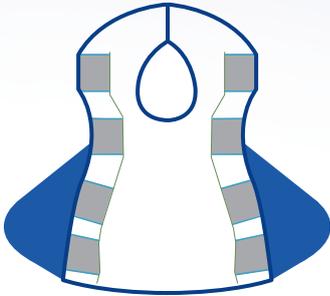


<SHORT ARM 1 (와이드)>




<SHORT ARM 2 (와이드)>
The Left Hand



<SHORT ARM 2 (와이드)>
The Right Hand

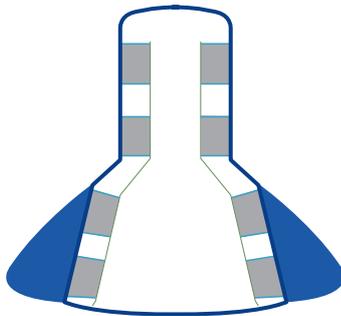

<SHORT ARM 3 (와이드)>

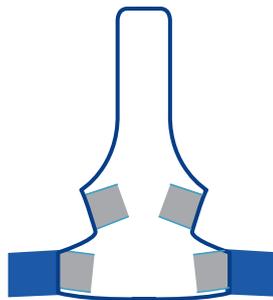

<SHORT ARM 4 (와이드)>
Thumb Spica



<LONG ARM (와이드)>



<SHORT LEG (와이드)>



<LONG LEG (와이드)>



<LONG LEG (와이드실린더)>

부위별	형명	부위별	형명	부위별	형명	부위별	형명
SHORT ARM	W1105와이드[대형]	SHORT ARM	W2105와이드[대형]	SHORT ARM	W3105와이드[대형]	SHORT ARM	W4105와이드[대형]
	W1100와이드[중형]		W2100와이드[중형]		W3100와이드[중형]		W4100와이드[중형]
	W195와이드[소형]		W295와이드[소형]		W395와이드[소형]		W495와이드[소형]
LONG ARM	W105와이드[대형]	SHORT LEG	W105와이드[대형]	LONG LEG	W105와이드[대형]	LONG LEG	W105와이드실린더[대형]
	W100와이드[중형]		W100와이드[중형]		W100와이드[중형]		W100와이드실린더[중형]
	W95와이드[소형]		W95와이드[소형]		W95와이드[소형]		W95와이드실린더[소형]



Juthis

(주)쥬디스코퍼레이션

마케팅: (주)쥬디스코퍼레이션

서울 서초구 바우뒀로 7길 3 (중평빌딩 9층)

TEL: 02-3461-1002 / 070-8244-5018 FAX: 02-571-7617

<http://www.juthis.com>

제조: 에스엠메디컬